



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®  
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for  
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-  
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult  
ult **IT** Istruzioni **SE** Bruksanvisning för Cricath® Adult **IN** Instructie Cricath®  
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult  
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções  
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**  
**NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®  
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de  
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

## Bruksanvisning för Cricath Adult

Namn Ventinova Medical B.V.



Produktnamn	Cricath® Adult	Steril	
Produktlogotyp		Engångsprodukt	
ID = Innerdiameter	2.0 mm	Se bruksanvisning	
Längd	7 cm	Innehåller inte rågummilatex	
Produktnummer			

**Användare**

Cricath Adult måste användas av, eller under övervakning av, sjukvårdspersonal som utbildats för och har erfarenhet av luftvägsingrepp.

**Avsedd användning**

Cricath Adult är avsedd för att ge tillträde till luftstrupen då konventionell intubation med mask och/eller grov endotrakealtub inte kan användas på vuxna patienter.

## Patientgrupp

Vuxna

## Kontraindikationer

Inga kända

## Potentiella komplikationer

- Blödning
- Hematom
- Rubbning av kateter
- Subkutant emfysem
- Mediastinalt emfysem
- Punktering av matstruben

## Produktbeskrivning

Cricath Adult är en kateter för koniotomi med en längd på 7 cm och en innerdiameter på 2.0 mm och som är uppträdd på en 1.8 mm nål.

## Förpackning

- Förpackningen innehåller Cricath Adult, inklusive spruta och halsrem.
- Förpackningen kan enkelt rivas upp och har steriliserats med hjälp av etylenoxid.
- Cricath Adult är steril så länge som förpackningen är oskadad och oöppnad. Använd inte Cricath Adult om det nns någon misstanke om att förpackningen har skadats.
- Förvara den förpackade produkten på en torr plats.
- Undvik utdragen exponering för ljus.

## Bruksanvisning för Cricath Adult

### Ytterligare material som krävs


- Sterilt vatten
- Ventilationsenhet med han-luerfattning (t.ex. Ventrain®)

### Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd Cricath Adult endast i kombination med ventilatorer som fungerar ordentligt när de är anslutna till en nkalibrig kateter, till exempel Ventrain. Se ventilationsenhetens bruksanvisning.
- Fäst Cricath Adult ordentligt under användningen för att hålla katetern på plats i luftstrupen under hela användningen.
- För inte in nålen i katetern igen efter att nålen har dragits ut. Det kan skada eller punktera kateterväggen.
- Om möjligt och tillämpligt bör aseptisk teknik och lokalbedövning användas.

### Bruksanvisning

- 1 Avlägsna skyddsörret från katetern, fyll sprutan med sterilt vatten eller saltlösning och fäst den vid katetern.
- 2 Förbered främre delen av halsen på patienten.
- 3 Identi era membrana krikothyroidea (som nns mellan struphuvudets ringbrosk och sköldbrosk) genom palpation (*Figur A* och *A\**).
- 4 Håll luftstrupen stilla mellan tummen och pekngret.
- 5 Håll katetern i den transparenta nålanslutningen eller den vattenfyllda sprutan.
- 6 För in kateterspetsen genom punktering av membrana krikothyroidea med nålspetsen (*Figur A* och *A\**). När luftstrupen nås känns ett minskat motstånd.

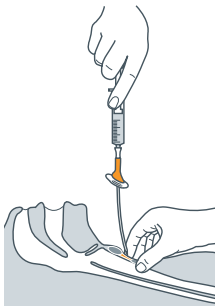


Figur A




Membrana krikothyroidea

Figur A\*

- 7 Dra ut kolven på sprutan för att bekräfta att katetern har nått luftstrupen (Figur B). Luft ska fylla sprutan.
- 8 För försiktigt in endast katetern i luftstrupen tills änsen vilar mot halsen (Figur C).

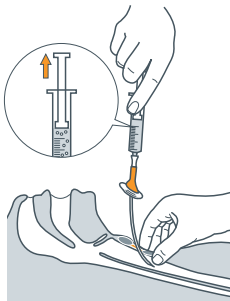


Figur B

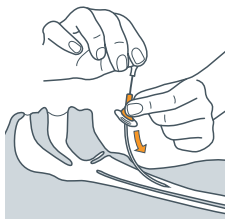

Figur C

## Bruksanvisning för Cricath Adult

- 9 Avlägsna sedan nålen (*Figur D*). För inte in nålen i katetern igen efter att nålen har dragits ut. Det kan skada eller punktera kateterväggen.
- 10 Fäst sprutan vid katetern och aspirera på nytt för att bekräfta kateterns position.
- 11 Fäst katetern med den medföljande remmen eller på annat önskat och säkert sätt (*Figur E*).

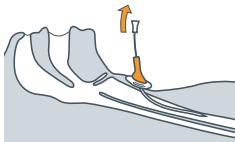


Figur D



Figur E

- 12 Anslut en lämplig ventilationsenhet (t.ex. Ventrain) på katetern (*Figur F*).

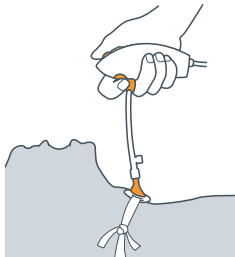

Figur F

© 2018 Ventinova, Eindhoven Nederlanderna, alla rättigheter reserverade.

® 2018 Ventinova, Ventrain Ventinova Medical registrerade handel varumärken.

September 2018



MSS155.00

[www.ventinovamedical.com](http://www.ventinovamedical.com)



**Ventinova Medical B.V.** 5652 BJ Eindhoven **T** +31 (0)40 751 60 20  
**A** Meerenakkerplein 7 The Netherlands **E** info@ventinova.nl